

# Anleitung Sonographie Geräte (LOGIQ)

Lehr – und Lernzentrum  
Medizinische Fakultät Essen

# Schritt 1: Positionierung des Gerätes

**1.1**

**Das Ultraschallgerät an der  
gewünschten Stelle  
im Raum platzieren**



# Schritt 2: Strom anschließen

**Im Boden finden sich Bodentanks**



**Durch Aufklappen der Bodentanks legt man die Steckdosen frei**



# Schritt 3: Strom anschließen


**Den Stecker des Gerätes einstecken**



**Den Tank wieder verschließen, die Metallklappe bleibt aber offen**




# Schritt 4: Einschalten des Sonographie Geräts

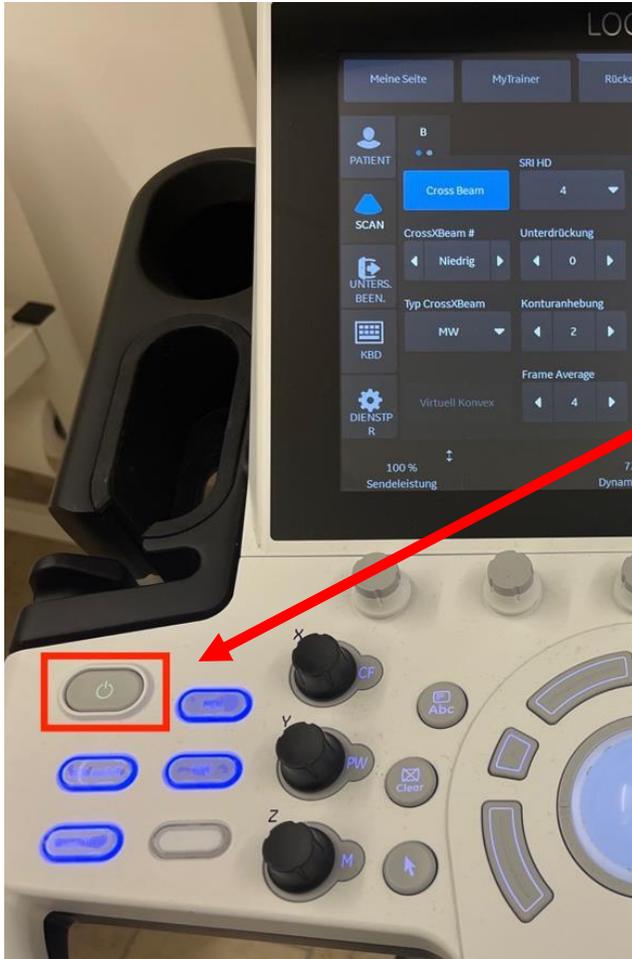

- Einschalten des Sonographie Gerätes durch Betätigen des „On“-Knopfes  
Dieser befindet sich auf der linken Seite des Bedienfeldes

# Schritt 5: Schallkopf auswählen

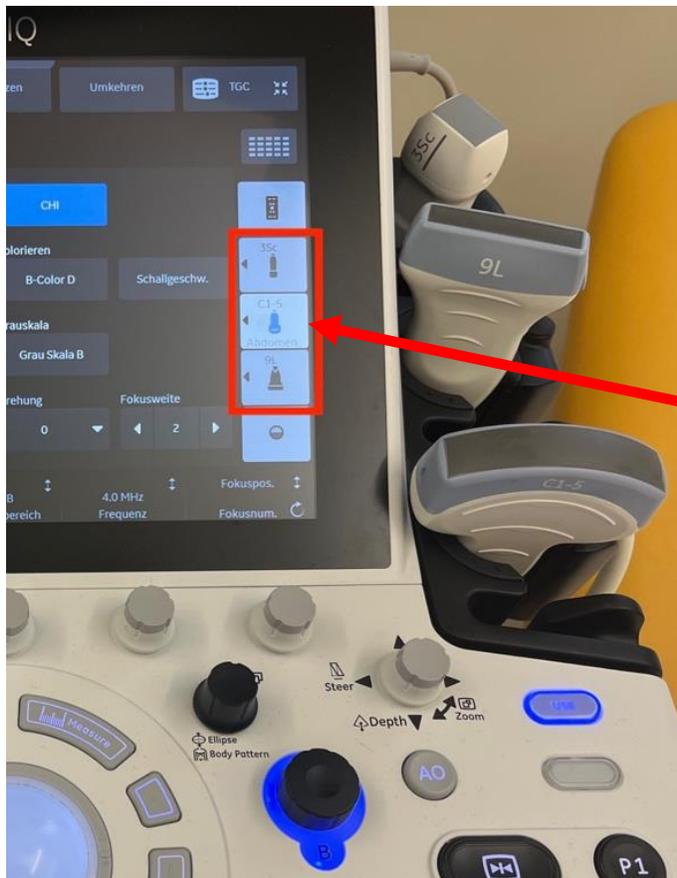

Für das Auswählen des  
korrekten  
Schallkopfes, das  
entsprechende  
**Ikon**  
am rechten Rand des  
unteren  
Bildschirms anklicken

# Schritt 4: Gerät ausschalten

**Nach Gebrauch erneut den**

**„On“-Knopf betätigen**

**Sobald das Gerät  
heruntergefahren ist kann der  
Stecker gezogen werden**

# Schritt 5: korrektes Schließen der Bodentanks

**So nicht!!**



**Sondern so!!**

